

Hårprov från häst för DNA-analys

Följande material ingår i ett provtagnings-set:

Plastpåse med blytlåsförslutning. I en och samma påse får endast prov från en häst finnas.

Pappskiva och självhäftande etikett.

Etiketten märks med hästens namn och ev. registreringsnummer/
betäckningsrapportsnr. el dyl. och används därefter till att fixera hästens hårstrån på pappskivan.

Beställningsblanketten ska fyllas i så fullständigt som möjligt och åtfölja provet till laboratoriet. Notera till vem resultat ska skickas om detta är någon annan än hästens ägare. Blanketten undertecknas av provtagare (normalt id-kontrollant eller veterinär) samt beställare. Kryssa i valt alternativ för betalning.

För hästar som ska registreras av SWB, SIF Avel och Svensk Travsport skickas proverna direkt till respektive registratur och denna blankett ska inte fyllas i.

Instruktion:

Hårprov från häst för DNA-analys tas från **svansen** (grovt svanstagel). Håren skall ryckas ut så att **roten** följer med. Se till att ingen smuts eller lösa hårstrån finns på den yta där provet skall tas genom att borsta rent. Taglet får inte vara fuktigt, svettigt eller innehålla rester av schampo. Det är ett absolut krav att inget hårstrå eller stöv från någon annan häst kommer med i provet. Fatta tag om **30-40 hårstrån** med fingrarna nära roten och ryck. Kontrollera att roten finns med på flertalet strån. *Ta ej på hårsäckarna!* **Hårstrån som klipps av går inte att använda.**

Lägg hårstråna på pappskivan med rotändan mot ena kortsidan så att stråna sticker ut ½-1 cm utanför pappskivans kant.

Fixera hårstråna vid pappskivan med den självhäftande etiketten. Se bild nedan. Klipp av överflödigt hår i änden **utan** hårrötter. Fäst ev. chipnummeretikett på provets baksida.

Stoppa ned pappskivan i plastpåsen med hårrötterna mot öppningen och förslut påsen noga. **Inga hårstrån får sticka ut genom förslutningen!** Endast ett prov per provpåse. Flera förslutna påsar kan dock skickas i samma kuvert. Proverna skickas tillsammans med beställningsblankett till:

Husdjursgenetiska Laboratoriet, SLU Box 7023

750 07 Uppsala

Betala analysen i samband med att proverna skickas till laboratoriet. Se prislista på www.slu.se/hgenlab/prislista

Resultat skickas med e-post till angiven resultatmottagare. Normal handläggningstid är 10-15 arbetsdagar.

Eventuella frågor besvaras på telefon 018-67 28 04 (må-fr 10.00-11.00), eller via e-post hgenlab@slu.se. Mer information finns på vår hemsida: www.slu.se/hgenlab.

